




Montage Voorschriften

Beademings frame

Vivo 50

872FOCBABA122001000122

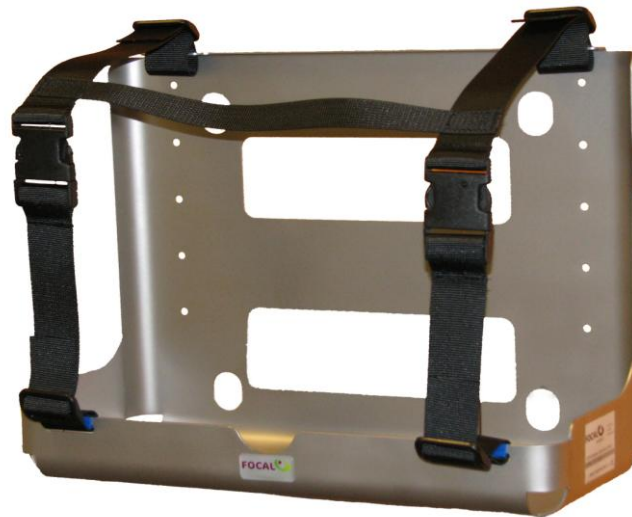

Punten van aandacht bij het monteren van de 872FOCBABA122001000122 op een rolstoel :

- ° De 10 gaten links en rechts op de rug van het frame dienen te worden gebruikt voor montage van het frame op de stoel. Dit patroon is geschikt voor montage op de meeste gangbare rolstoelen, mocht er voor een specifieke opbouw een extra gat geboord moeten worden dan: max Ø8 en min 15 mm van de zijkant van het frame en de andere gaten, zo blijft de sterkte bij extreme belasting gewaarborgd.
- ° De montage op de stoel zal m.b.v. M6 minimaal 8.8 geclassificeerde bouten plaats moeten vinden, evt. bij een kleine Ø boutkop een carrosseriering onder de kop plaatsen. De bouten dienen degelijk geborgd te zijn met zelfborgende moeren of loctite schroefdraadborging.
- ° Bij montage m.b.v. de daarvoor bestemde gaten van Ø6 dient er rekening mee gehouden te worden dat er minimaal 4 bouten worden gebruikt. De bouten dienen zodanig geplaatst te worden dat er minimaal één gat tussen de bouten overgeslagen wordt.
- ° Het frame dient bij voorkeur op het hoofdframe van de rolstoel gemonteerd te worden.
- ° Het frame dient zo laag mogelijk te worden gemonteerd om het zwaartepunt van de rolstoel niet onnodig te verhogen.

