

Eetapparaat My Spoon™


Snelstartkaart



Lees eerst de handleiding grondig voor veilig en correct gebruik van My Spoon


1. Het plaatsen van vork en lepel

1) Controleer de insteekopening

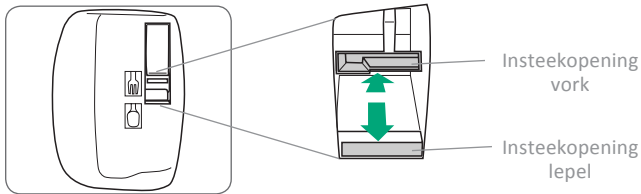


Afhankelijk van de toestand van My Spoon kan de insteekopening van de vork meer naar binnen in de hand verplaatst zijn. Als dit het geval is kunt u het apparaat weer UIT zetten nadat de opstartprocedure doorlopen is. Vervolgens kunt u de vork insteken

2) Houd de hand van My Spoon met één hand vast, en steek de lepel naar beneden in de insteekopening.

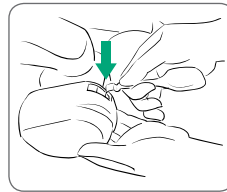

- Steek de lepel stevig in de opening tot deze stopt.

3) Houd de hand van My Spoon met één hand vast, en steek de vork naar voren in de insteekopening.

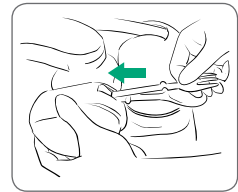


- Steek de vork stevig in de opening tot deze stopt.

2. Montage van de joystick

Standaard Joystick


Voor kinbediening

Plaats de joystick in een positie die overeen komt met het midden van de kin van de gebruiker of iets rechts ervan. Dit om de lepel en vork combinatie niet in contact met de joystick te laten komen.

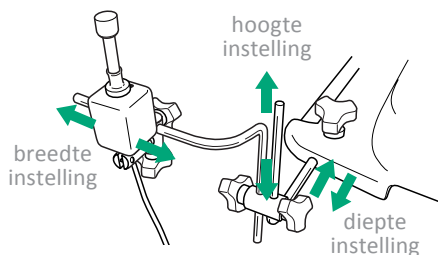


Voor handbediening

Plaats de joystick in een positie die overeen komt met de hand van de gebruiker zo dat deze niet in contact kan komen met de rolstoel, tafel of de gebruiker zelf.

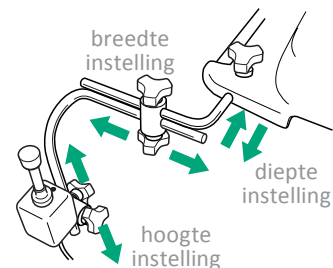


Verzwaarde Joystick

Plaats de joystick in een positie die overeen komt met de hand van de gebruiker zo dat deze niet in contact kan komen met de rolstoel, tafel of de gebruiker zelf.

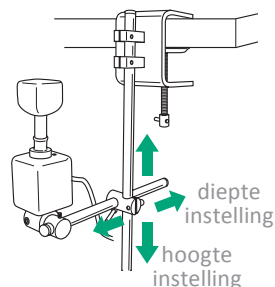

Eénfunctieschakelaar

Plaats de schakelaar zodanig dat het gebruik ervan gemakkelijk gaat.

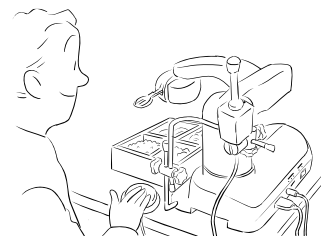


3. Opdiene van voedsel

Serveren van voedsel



- Gebruik altijd het bijgeleverde maaltijdplateau
- Snijd het eten altijd in kleine stukjes
- Schenk drinken in de beker en plaats de beker in de bekerhouder

Plaats het maaltijdplateau op de bevestigingsplaat van My Spoon

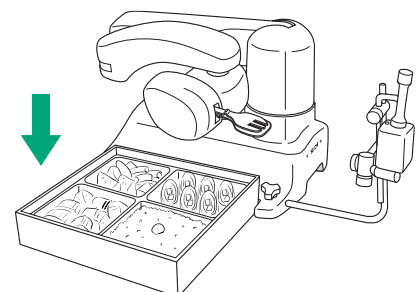

4. Inschakelen



- Steek de stekker in een stopcontact
- Druk de hoofdschakelaar op de zijkant van het apparaat in en zet hiermee het apparaat AAN
- Druk het pookje van de joystick naar voren, achteren, links en rechts

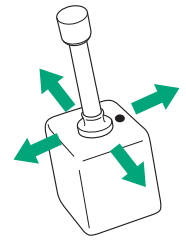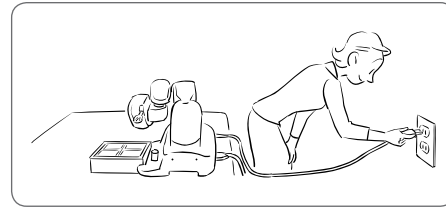

U hoort een kort piepje en het 'in gebruik' lampje knippert. De arm van My Spoon beweegt zich over het maaltijdplateau en de opstartprocedure begint.

5. Aanpassen van de stoppositie van de hand

- Na de opstartprocedure kan de stoppositie worden bepaald
- Gebruik de joystick om de stoppositie aan te passen. De afstand tussen de voorzijde van vork en lepel en de mond van de gebruiker dient 1 a 2 cm. te zijn
- Druk de joystick of drukknop in om de stoppositie vast te leggen

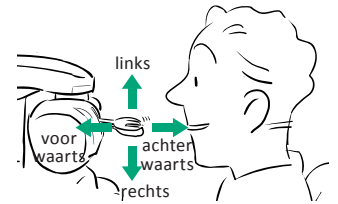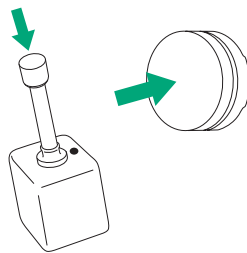


Wanneer My Spoon voor de eerste keer gebruikt wordt of wanneer de plaatsing van tafel of gebruiker gewijzigd zijn dient de stoppositie opnieuw te worden ingesteld. Zodoende wordt vermeden dat het apparaat het gezicht van de gebruiker kan raken.

6. Eten met My Spoon (manueel)


Gebruik My Spoon alléén in aanwezigheid van een verzorger!

Bij Semi-automatische bediening brengt My Spoon voedsel nadat een vak is gekozen
Bij Automatische bediening brengt My Spoon voedsel na het indrukken van de éénfunctieschakelaar


- Kies het gewenste bakje

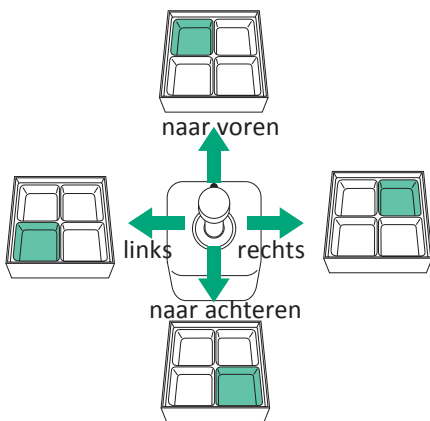

- Plaats hand en grijp voedsel

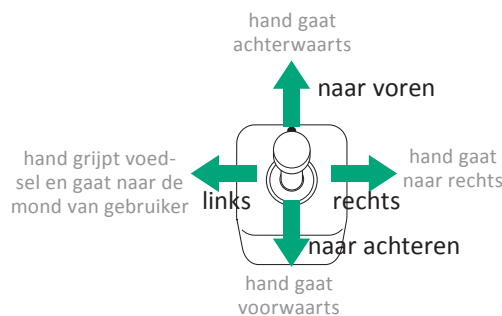


- Raak met uw mond de lepel en hap voedsel af nadat de vork zich heeft teruggetrokken

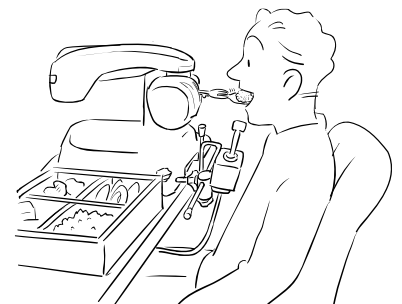

7. Reinigen van My Spoon


- Controleer of de hand van My Spoon zich in de stand-by positie bevindt, of lepel en vork gesloten zijn en of de randen van lepel en vork zich op één lijn bevinden.

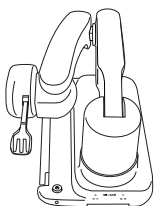

- Verwijder de stekker uit het stopcontact



- Verwijder de lepel en vork uit het apparaat

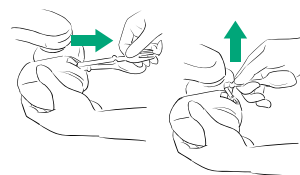

- Verwijder het maaltijdplateau

